

Produkt: Respirátor Harley

Třída ochrany: FFP2

Standard: EN 149:2001+A1:2009

CE směrnice: PPE 89/686/EEC – (článek 10) - Osobní ochranný prostředek kategorie III

Účel použití: Respirátor Harley pomáhá chránit nositele před nebezpečnými, ve vzduchu obsaženými kontaminanty

INSTRUKCE K POUŽITÍ:


1. Rozevřete respirátor oběma rukama.
2. Respirátor pevně přitiskněte k obličejí pomocí nosní spony.
3. Fixační pásky respirátoru přetáhněte za uši.
4. Vytvarujte nosní sponu kolem nosu prsty obou rukou.
5. Zkontrolujte těsnost:
 - a) k testu těsnosti respirátoru bez výdechového ventilu si položte obě ruce ze stran respirátoru a zprudka vydechněte;
 - b) k testu těsnosti respirátoru s výdechovým ventilem si položte obě ruce ze strany respirátoru a zprudka se nadechněte. Uvnitř respirátoru by se Vám měl vytvořit podtlak;
 - c) jestliže Vám vzduch proniká pod respirátorem v oblasti nosu, znovu vytvarujte nosní sponu;
 - d) jestliže Vám vzduch proniká pod boční stranou, upravte pozici bočního popruhu tak, aby Vám respirátor dokonale těsnil.
6. Vyměňte respirátor ihned, jakmile dochází ke zhoršení dýchání, nebo je respirátor poničen.
7. Vyměňte respirátor ihned, pokud Vám dokonale nesesedí na tváři.
8. Pro správné užití respirátoru je nutné, abyste pozorně četli instrukce k použití a řídili se jimi.

VAROVÁNÍ:


Respirátor je vysoce účinný proti částicím bezolejových aerosolů. Tento respirátor pomáhá chránit proti škodlivým částicím, ale také nevylučuje vystavení riziku nákazy a infekce. Nesprávné použití může mít za následek onemocnění, popřípadě smrt.

Respirátor Harley je určena na 8 hodin nepřetržitého používání, následně je určena k likvidaci.

Instrukce pro správné nasazení respirátoru

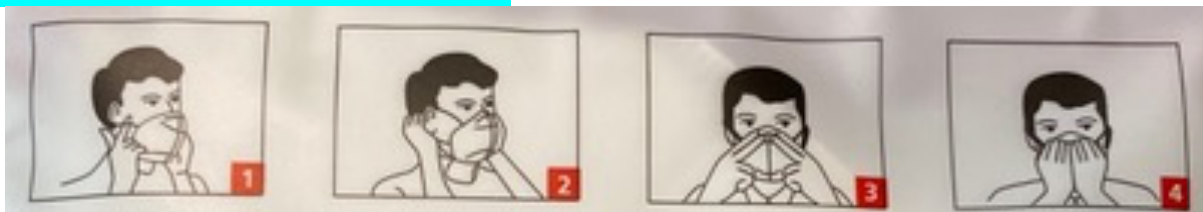

CE  REP SAI Global Assurance Services Ltd. (Notified Body: 2056), Davy Avenue, Knowhill Milton Keynes, MK5 8HJ, United Kingdom

 Guangzhou Harley Commodity Co., Ltd., Floor 1 to 4, #8, Team 17, Sandong Village, Xinhua Street, Huadu District, Guangzhou, Guangdong, P.R.China