

**Popis**

**AquaGuard** je nepropustná bariera proti vlhkosti, ktorá umožňuje lekárom alebo pacientom zakryť rany, obväzy a vpichy a udržovať je tak v suchu počas sprchovania. Skladá sa z odolnej polyetylénovej bariéry s jemnými adhezívnymi okrajmi a je dostupná v mnoha veľkostiach.

**Indikácia k použitiu**

**AquaGuard** je navrhnutý na zakrytie rán, obväzov a vpichov počas sprchovania, aby bola táto miesta udržaná v suchu. Běžně se používá k zelyování katétrů PICC, portů, podkožních a vnitřních krevních míst, míst po zákroku nebo jiných míst na hrudi nebo zádech. Tento produkt může být aplikován poskytovatelem lékařské péče nebo pacienty.

**Opotrebení**

**AquaGuard** se Indikuje pouze pro sprchování a nedoporučuje se pro plavání nebo ponoření do vody. **AquaGuard** nenahrazuje primární obväzové krytí. Pro nejlepší výsledky by měl být **AquaGuard** aplikován na pacienta ošetrovatelem. Produkt **AquaGuard** aplikujte na čistou a suchou pokožku. Před aplikací nepoužívejte krémy. Po aplikaci Produktu **AquaGuard** jej nenadzvedejte ani se nesaňte. Upravovat jeho polohu. Nepoužívejte, pokud je produkt protřený nebo vykazuje známky opotřebení. **AquaGuard** je produkt na jedno použití. V případě opakovaného použití nemusí poskytovatel účinnou ochranu během sprchování. Při známých citlivosti nebo podráždění pokožky přestaňte produkt používat.

**Pokyny pro aplikaci**

- Před aplikací se ujistěte, že je pokožka suchá a nejsou přítomny žádné oleje nebo krémy. Pro přípravu pokožky před aplikací můžete použít hadřík namočený v alkoholu.
- Připravte **AquaGuard** k aplikaci tak, že vytvoříte „úchytky“ v rozích na zadních částech produktu. Viz Obrázek 1.
- Pomocí úchytek odstraňte horní vrstvu zadního pásku a aplikujte lepicí stranou dolů na pokožku. Viz Obrázek 2.
  - U horní/odolných míst** umístěte lepicí část na pokožku nad centrálním katérem nebo krytím portu.
  - U vnitřních krevních míst** umístěte lepicí část těsně nad krytí pod okrajem čelisti a směrem k bradě, je-li to možné.
- Odstraňte jednotlivé pásy na zadní straně, rozložte jednotlivé strany a aplikujte. Viz Obrázek 3.
  - U horní/odolných míst** odstraňte boční pásek a během přilepování k pokožce produkt uprostřed „složte“. Chytněte složení a poté rozkládejte do stran a vyvíjejte tlak, abyste zajistili dobrá přichycení. Opakujte na druhé straně.
  - U vnitřních krevních míst** požádejte pacienta o naklonění krku směrem od tohoto místa. Odstraňte boční pásek a umístěte podél krytí. Pokud je nutné rozkládat, chytněte složení, rozkládejte do stran a vyvíjejte tlak, abyste zajistili dobrá přichycení. Opakujte na druhé straně.
- Odstraňte spodní pásek a umístěte těsně pod krytí, v případě potřeby skládejte. Viz Obrázek 4.
- Prohmatejte lepicí okraj proti pokožce, abyste zajistili vodovzdornost. Viz Obrázek 5 a 6.

**Pokyny pro odstránění**

- Po sprchování jemně osušte okolní oblast.
- Jemně produkt sejměte ve směru růstu chlupů a zlikvidujte.

**Poznámky**

- Pocením může dojít ke vzniku vlhkosti.

Pro uživatele v Evropské unii: Pokud dojde v souvislosti s použitím tohoto zařízení k vážnému incidentu, ihned poskytněte podrobnosti výrobci a příslušnému orgánu ve vašem členském státě EU.



Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3



Obrázek 4



Obrázek 5



Obrázek 6

**Opis**

**AquaGuard** je nepropustná bariera proti vlhkosti, ktorá umožňuje lekárom alebo pacientom prikrýť rany, obväzy a miesta intravenózneho vstupu a uchovávať ich v suchu počas sprchovania. Skladá sa z odolnej polyetylénovej bariéry s jemnými príľnavými okrajom a dodáva sa v rôznych veľkostiach.

**Indikácie na použitie**

**AquaGuard** je navrhnutý na krytie a uchovávanie rán, obväzov a miest Intravenózneho vstupu v suchu počas sprchovania. Medzi bežné aplikácie patria katetre PICC, porty, miesta pod kľúčnou kosťou a na vnútornú krčnú žilu, malé chirurgické miesta a ďalšie miesta na hrudníku alebo chrbte. Táto pomôcka môže byť aplikovaná poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti alebo pacientmi.

**Bezpečnostné opatrenia**

Pomôcka **AquaGuard** je určená iba na sprchovanie a neodporúča sa na plávanie alebo ponorenie pod vodu. **AquaGuard** nie je náhradou za primárne obväzy. Pre najlepší výsledok by mal **AquaGuard** aplikovať poskytovateľ starostlivosti. Pomôcka **AquaGuard** aplikujte na čistú, suchú pokožku. Pred aplikáciou nepoužívajte pleťové mlieko ani krém. Po umiestnení pomôcky **AquaGuard** sa nepokúšajte o jej nadvíhnutie ani o zmenu jej polohy. Ak je pomôcka prerazená alebo preukazuje známky poškodenia, nepoužívajte ju. **AquaGuard** je výrobok na jedno použitie. Ak sa použije opakovane, nemusí poskytovateľ účinnú ochranu počas sprchovania. Ak sa vyskytne citlivosť alebo podráždenie, prestaňte pomôcku používať.

**Návod na aplikáciu**

- Pred aplikáciou zabezpečte, aby bola pokožka suchá a neboli na nej zvyšky olejov a krémov. Na prípravu pokožky na aplikáciu môže byť potrebné použitie utierky namočenaj v liehu.
- Připravte **AquaGuard** na použitie vytvorením „úchytů“ v každém rohu podložních pruhů. Pozrite si obrázok 1.
- Použitím úchytů odstraňte horní podložní pruhůk a přiložte spodní příľnavú stranu k pokožke. Pozrite si obrázok 2.
  - U horní/odolných miest** umiestnite príľnavú stranu nad centrálny katéter alebo obväz portu.
  - U miest na vnútornom krčnom žile** umiestnite príľnavú stranu tesne nad obväz postupujúci popod obrys čelisti a ak je to možné, smerom k brade.
- Po jednom odstraňujú bočné podložné pruhůk, každú stranu ohnite a aplikujte. Pozrite si obrázok 3.
  - U horní/odolných miest** odstraňte bočný pruhůk a v strednej časti vytvorite „záhyb“, zatiaľ čo aplikujete príľnavú stranu na pokožku. Uchopte záhyb, potom pomôcku z jednej strany na druhú kloďte na miesto aplikácie. Aplikujte tlak, aby ste zabezpečili dobrú príľnavosť. Postup opakujte na druhej strane.
  - U miest na vnútornom krčnom žile** dajte pacientovi pokyn, aby odklonil krk od miesta aplikácie. Odstraňte bočný pásek a aplikujte pozdĺž miesta obväzu. Ak je potrebné vytvorenie záhybu, záhyb uchopte, potom pomôcku z jednej strany na druhú kloďte na miesto aplikácie. Aplikujte tlak, aby ste zabezpečili dobrú príľnavosť. Postup opakujte na druhej strane.
- Odstraňte spodný podložný pruhůk a aplikujte tesna pod miesto obväzu. Ak je to potrebné, použite záhyb. Pozrite si obrázok 4.
- Masírujte príľnavý okraj o pokožku, aby ste zabezpečili vode odolné utesnenie. Pozrite si obrázok 5 a 6.

**Pokyny na odstránění**

- Po sprchovaní a pred odstránením pomôcky jemna pramasařujúe okolie aplikácie.
- Jemne odťahujte v smere rastu chlpkov a zlikvidujte.

**Poznámky**

- Z dôvodu potania sa môže vyskytnúť istá vlhkost.

Pre používateľov v Európskej únii: Ak sa v súvislosti s použitím tejto pomôcky vyskytne akýkoľvek vážny incident, ihneď nahláste podrobnosti výrobcovi a kompetentnému orgánu vo vašom členskom štáte EU.



Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3



Obrázek 4



Obrázek 5



Obrázek 6